

Instrukcja bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Elektrody żelowe do elektrostymulatorów

BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ

1. Przed użyciem elektrod żelowych należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia elektrostymulującego.
2. Nie stosować elektrod na uszkodzoną skórę, rany, stany zapalne ani w miejscach z implantami metalowymi.
3. Przed nałożeniem elektrod należy oczyścić i osuszyć skórę.
4. Przechowywać elektrody w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym i wysoką temperaturą.
5. Nie udostępniać elektrod innym osobom – są przeznaczone do użytku indywidualnego.
6. Chronić przed dziećmi

OSTRZEŻENIA

1. Nie stosować u osób z rozrusznikiem serca lub innymi wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi.
2. Nie używać w okolicach serca, szyi ani głowy.
3. Nie stosować elektrostymulacji u kobiet w ciąży bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
4. W przypadku podrażnienia skóry natychmiast przerwać użytkowanie.
5. Elektrody należy wymieniać, gdy żel przestaje być lepki lub elektroda nie przylega prawidłowo do skóry.