

FIZJOLOVE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA GPSR

Przeznaczenie produktu

Urządzenie przeznaczone jest do domowego masażu okolicy kolana z wykorzystaniem funkcji ogrzewania oraz wibracji. Produkt wspomaga relaksację mięśni i zapewnia komfort cieplny. Nie jest wyrobem medycznym i nie służy do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania chorobom.

Ostrzeżenia ogólne

- Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone, zdeformowane lub wykazuje nieprawidłowe działanie.
- Nie dokonywać samodzielnych napraw ani modyfikacji produktu.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Przed uruchomieniem należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo założone i nie ogranicza krążenia krwi.
- Nie stosować produktu przez czas dłuższy niż zalecany przez producenta.
- W przypadku odczuwania nadmiernego ciepła, bólu, pieczenia lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać użytkowanie.
- Nie używać podczas snu ani w stanie ograniczonej świadomości.
- Nie stosować produktu podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.
- Nie zakładać urządzenia na obszary ciała z zaburzeniami czucia.

Ostrzeżenia dotyczące funkcji grzania

- Powierzchnia grzewcza może osiągać wysokie temperatury.
- Długotrwały kontakt z nagrzaną powierzchnią może prowadzić do podrażnień lub oparzeń skóry.
- Osoby o wrażliwej skórze powinny rozpoczynać użytkowanie od najniższego poziomu temperatury.
- Nie stosować urządzenia na uszkodzoną, podrażnioną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie przykrywać pracującego urządzenia kocami, poduszkami ani innymi materiałami ograniczającymi odprowadzanie ciepła.
- Nie używać w pobliżu źródeł ciepła ani materiałów łatwopalnych.

Przeciwwskazania zdrowotne

Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- ciąży,
- wszczepionego rozrusznika serca lub innych implantów elektronicznych,
- chorób układu krążenia,
- zakrzepicy,
- stanów zapalnych stawów w fazie ostrej,
- chorób nowotworowych,
- zaburzeń czucia,
- cukrzycy,
- świeżych urazów, złamań lub ran w miejscu stosowania.
- Nie stosować produktu bezpośrednio na miejsca objęte stanem zapalnym lub obrzękiem niewiadomego pochodzenia.

Bezpieczeństwo akumulatora i ładowania

- Produkt należy ładować wyłącznie przy użyciu zalecanych źródeł zasilania.
- Nie używać uszkodzonych przewodów lub ładowarek.
- Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru przez dłuższy czas.
- Nie narażać akumulatora na działanie wysokiej temperatury, ognia ani bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie przebijać, nie zginać i nie rozmontowywać akumulatora.
- W przypadku wycieku elektrolitu zaprzestać użytkowania produktu.

Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt nie jest zabawką.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Elementy opakowania mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem wyłączyć urządzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani wybielaczy.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest mokre lub wilgotne.

Przechowywanie

- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i promieni słonecznych.
- Unikać przechowywania w temperaturach poniżej 0°C oraz powyżej 40°C.
- Nie zginać nadmiernie elementów grzewczych ani przewodów.

Utylizacja

- Produkt zawiera akumulator oraz elementy elektroniczne.
- Nie wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.
- Zużyty sprzęt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.