

# FIZJOLOVE

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA GPSR

### Przeznaczenie produktu

Rowerek rehabilitacyjny Basic jest przeznaczony do lekkich ćwiczeń aktywizujących kończyny dolne oraz górne w warunkach domowych. Produkt służy do treningu o niskiej intensywności oraz wspomaganie aktywności ruchowej osób dorosłych i seniorów. Nie jest wyrobem medycznym.

### Ostrzeżenia ogólne

- Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane i dokręcone.
- Produkt należy ustawiać wyłącznie na stabilnej, równej i suchej powierzchni.
- Nie używać urządzenia na śliskim podłożu.
- Podczas ćwiczeń zaleca się korzystanie z krzesła lub fotela zapewniającego stabilną pozycję użytkownika.
- Nie przekraczać maksymalnego obciążenia określonego przez producenta.
- Produkt nie jest przeznaczony do stania na pedałach ani do użytkowania w pozycji stojącej.
- Nie używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub wykazuje oznaki zużycia mogące wpływać na bezpieczeństwo.

### Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt nie jest zabawką.
- Dzieci mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Podczas przechowywania produkt należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Istnieje ryzyko przytrafienia palców przez ruchome elementy oraz mechanizm składania.

### Ryzyko związane z użytkowaniem

- Nie wkładać palców, włosów, odzieży ani innych przedmiotów w pobliże ruchomych części urządzenia.
- Należy używać odpowiednio dopasowanego obuwia lub ćwiczyć zgodnie z zaleceniami producenta.
- Przed rozpoczęciem ćwiczeń upewnić się, że stopy lub dłonie są prawidłowo umieszczone na pedałach.
- W przypadku wystąpienia bólu, zawrotów głowy, duszności lub innych niepokojących objawów należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem.

### Bezpieczeństwo osób o szczególnych potrzebach

- Osoby po urazach, zabiegach operacyjnych, z chorobami układu krążenia lub ograniczeniami ruchowymi powinny skonsultować możliwość korzystania z urządzenia z lekarzem lub fizjoterapeutą przed rozpoczęciem ćwiczeń.
- Produkt nie zastępuje profesjonalnego sprzętu rehabilitacyjnego ani opieki medycznej.

### Bezpieczeństwo baterii

- Licznik LCD zasilany jest baterią guzikową.
- Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wolno połykać baterii. Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia wewnętrzne.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

### Konserwacja i przechowywanie

- Regularnie kontrolować stan pedałów, śrub, pokrętła regulacji oporu i elementów konstrukcyjnych.
- Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych.
- Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Przed złożeniem lub rozłożeniem urządzenia upewnić się, że nie jest ono używane.

### Utylizacja

Produkt oraz baterie po zakończeniu okresu użytkowania należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych lub punktów zbiórki baterii zgodnie z obowiązującymi przepisami.