

Przeznaczenie

Produkt przeznaczony jest do stosowania jako kompres chłodzący lub rozgrzewający w celu łagodzenia dolegliwości związanych z bólem głowy i migreną, zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją używania.

OSTRZEŻENIA OGÓLNE

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan czapki oraz wkładu żelowego.
- Nie używać produktu, jeżeli jest uszkodzony, pęknięty, rozszczelniony lub jeżeli widoczny jest wyciek żelu.
- Nie przecinać, nie przebijać, nie zgniatać i nie uszkadzać wkładu żelowego.
- Zawartości wkładu żelowego nie wolno spożywać.
- W przypadku wycieku żelu należy natychmiast przerwać użytkowanie produktu.
- Unikać kontaktu zawartości wkładu z oczami, ustami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu dokładnie przepłukać wodą.
- Nie stosować produktu na uszkodzoną, podrażnioną lub chorobowo zmienioną skórę.
- Nie stosować podczas snu.
- Nie stosować w sposób powodujący nadmierny ucisk głowy.
- W przypadku wystąpienia bólu, pieczenia, drętwienia, nadmiernego zaczerwienienia lub innej niepożądaney reakcji należy natychmiast przerwać stosowanie.
- Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.
- Produkt nie zastępuje konsultacji lekarskiej ani leczenia zaleconego przez lekarza.

STOSOWANIE NA ZIMNO

- Produkt można schładzać zgodnie z instrukcją używania.
- Jeżeli producent nie dopuścił wyraźnie takiego zastosowania, nie umieszczać produktu w zamrażarce.
- Nie przykładать nadmiernie zimnego produktu bezpośrednio do skóry przez długi czas.
- W przypadku nadmiernego uczucia zimna, pieczenia, bólu lub drętwienia należy natychmiast zdjąć czapkę.
- Szczególną ostrożność zachować u osób z zaburzeniami czucia skóry.

STOSOWANIE NA CIEPŁO - KUCHENKA MIKROFALOWA

- Produkt przeznaczony jest również do stosowania jako ciepły kompres.
- Do podgrzewania należy używać wyłącznie kuchenki mikrofalowej zgodnej z instrukcją producenta produktu.
- Przed podgrzaniem należy sprawdzić, czy wkład żelowy nie jest uszkodzony ani nieszczelny.
- Nie podgrzewać uszkodzonego lub nieszczelnego wkładu.
- Podgrzewać produkt wyłącznie przez czas i przy mocy określonej w instrukcji używania.
- Nie przekraczać zalecanego czasu ani mocy podgrzewania.
- Nie pozostawiać produktu w kuchence mikrofalowej bez nadzoru podczas podgrzewania.
- Nie stosować funkcji grilla ani termoobiegu, chyba że producent wyraźnie dopuścił takie zastosowanie.
- Po podgrzaniu produkt może być bardzo gorący. Przed przyłożeniem do głowy należy sprawdzić jego temperaturę.
- Produkt należy przykładać do skóry dopiero po upewnieniu się, że temperatura jest bezpieczna i komfortowa.
- W przypadku uczucia pieczenia, bólu, nadmiernego ciepła lub dyskomfortu należy natychmiast zdjąć czapkę.
- Nie podgrzewać produktu wielokrotnie bez zachowania odpowiedniej przerwy, jeżeli instrukcja producenta określa takie ograniczenie.
- Nie podgrzewać produktu dłużej niż wskazano w instrukcji, nawet jeżeli nie osiągnął oczekiwanej temperatury.
- Po podgrzaniu należy zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania produktu z kuchenki mikrofalowej.
- Nie podgrzewać produktu razem z innymi przedmiotami ani metalowymi elementami, jeżeli instrukcja producenta tego zabrania.
- Jeżeli podczas podgrzewania produkt zacznie się nadmiernie nagrzewać, odkształcać, pęcznieć, wydzielać nietypowy zapach lub dym, należy natychmiast przerwać podgrzewanie i odłączyć kuchenkę od zasilania, jeśli jest to bezpieczne.

HIGIENA I CZYSZCZENIE

- Produkt należy utrzymywać w czystości.
- Czyścić zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani rozpuszczalników, które mogą uszkodzić materiał produktu.
- Nie prać w pralce ani nie suszyć w suszarce, chyba że producent wyraźnie dopuścił takie postępowanie.
- Nie zanurzać produktu w wodzie, jeżeli mogłoby to spowodować uszkodzenie wkładu lub jego konstrukcji.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i źródeł ciepła.
- Chronić przed ostrymi przedmiotami mogącymi uszkodzić wkład.
- Nie zginać, nie ścisnąć ani nie obciążać wkładu w sposób mogący doprowadzić do jego uszkodzenia.

WAŻNE INFORMACJE MEDYCZNE

Produkt służy do miejscowego stosowania jako kompres chłodzący lub rozgrzewający. Nie stanowi zamiennika diagnostyki ani leczenia.

W przypadku częstych, nasilających się lub nietypowych bólów głowy należy skonsultować się z lekarzem.