



1. Przeznaczenie produktu

Kompres żelowy FizjoloVe jest przeznaczony do stosowania miejscowego w celu uzyskania efektu chłodzącego lub rozgrzewającego, zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta.

Kompres może być stosowany na wybrane obszary ciała w celu miejscowego chłodzenia lub ogrzewania. Produkt przeznaczony jest do użytku zewnętrznego.

2. Ważne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania.
- Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie należy przykładać kompresu bezpośrednio do uszkodzonej skóry, ran, otarć ani miejsc objętych stanem zapalnym skóry.
- Nie należy stosować kompresu na skórę pozbawioną prawidłowego czucia temperatury.
- Podczas stosowania należy regularnie kontrolować stan skóry.
- W przypadku wystąpienia bólu, pieczenia, nadmiernego zaczerwienienia, drętwienia lub innego niepokojącego objawu należy natychmiast przerwać stosowanie.
- Nie należy zasypiać podczas stosowania kompresu.
- Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, jeżeli nie korzystają z niego pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie należy używać kompresu, jeżeli jego zewnętrzna powłoka jest uszkodzona, pęknięta, rozszczelniona lub jeżeli widoczne są wycieki żelu.
- Nie należy przebiegać, przecinać, zgniatć ani w inny sposób uszkadzać powłoki kompresu.
- W przypadku uszkodzenia opakowania kompresu lub wycieku zawartości należy zaprzestać użytkowania produktu.

3. Bezpieczne stosowanie na zimno

- Przed zastosowaniem chłodzącym kompres należy umieścić w zamrażarce lub lodówce zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy przykładać bardzo zimnego lub zamrożonego kompresu bezpośrednio do skóry.
- W celu ograniczenia ryzyka odmrożenia zaleca się stosowanie cienkiej warstwy materiału pomiędzy kompresem a skórą.
- Nie należy przekraczać zalecanego przez producenta czasu jednorazowego stosowania.
- W przypadku uczucia silnego zimna, bólu, drętwienia lub zmiany koloru skóry należy natychmiast zdjąć kompres.
- Nie należy stosować kompresu bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki, jeżeli jego temperatura może powodować uszkodzenie skóry.

4. Bezpieczne stosowanie na ciepło

- Kompres można podgrzewać wyłącznie w sposób określony przez producenta.
- Jeżeli kompres jest przeznaczony do podgrzewania w kuchence mikrofalowej, należy przestrzegać parametrów czasu i mocy podanych przez producenta.
- Nie należy przekraczać maksymalnego czasu ani mocy podgrzewania.
- Po podgrzaniu kompres może mieć bardzo wysoką temperaturę – przed przyłożeniem do skóry należy sprawdzić jego temperaturę.
- Po podgrzaniu należy równomiernie rozprowadzić ciepło w kompresie, jeżeli wymaga tego konstrukcja produktu.
- Nie należy przykładać gorącego kompresu bezpośrednio do skóry.
- Zaleca się stosowanie cienkiej warstwy materiału pomiędzy kompresem a skórą.
- Nie należy stosować kompresu w przypadku uszkodzenia, rozszczelnienia lub deformacji powłoki po podgrzaniu.
- Nie należy pozostawiać podgrzewanego kompresu bez nadzoru w kuchence mikrofalowej.
- Jeżeli podczas podgrzewania kompres ulegnie nadmiernemu napompowaniu, deformacji, rozszczelnieniu lub pojawi się nietypowy zapach, należy natychmiast przerwać podgrzewanie i pozostawić produkt do ostygnięcia.
- Nie należy podgrzewać kompresu bezpośrednio na źródle ognia ani na płycie grzewczej.

5. Ryzyko poparzenia i odmrożenia

- Nieprawidłowe zastosowanie kompresu, w szczególności użycie produktu o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze albo zbyt długi kontakt ze skórą, może prowadzić do miejscowego uszkodzenia skóry, w tym poparzenia lub odmrożenia.
- Osoby o ograniczonym czuciu temperatury powinny stosować produkt wyłącznie po konsultacji z lekarzem lub innym odpowiednim specjalistą medycznym.

6. Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nie stosować produktu:

- na otwarte rany i uszkodzoną skórę;
- w przypadku uszkodzenia lub rozszczelnienia kompresu;
- jeżeli występuje zaburzenie czucia temperatury w miejscu aplikacji;
- w sposób powodujący bezpośredni, długotrwały kontakt skóry z bardzo zimną lub bardzo gorącą powierzchnią; podczas snu;
- w sposób niezgodny z przeznaczeniem produktu lub instrukcją producenta.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania kompresu u osoby chorej, po zabiegu lub z istniejącymi przeciwwskazaniami medycznymi należy skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem ochrony zdrowia.

7. Bezpieczeństwo dzieci

- Produkt nie jest zabawką.
- Dzieci powinny korzystać z kompresu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Szczególną ostrożność należy zachować podczas podgrzewania produktu, ponieważ niewłaściwie podgrzany kompres może spowodować poparzenie.
- Nie należy dopuszczać do gryzienia, przekuwania ani uszkadzania kompresu.

8. Uszkodzenie kompresu

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan zewnętrznej powłoki.

Nie używać produktu, jeżeli:

- powłoka jest pęknięta lub przecięta;
- widoczny jest wyciek żelu;
- produkt jest zdeformowany w sposób mogący wpływać na jego bezpieczeństwo;
- występują inne widoczne uszkodzenia.

W przypadku kontaktu zawartości kompresu z oczami lub błonami śluzowymi należy dokładnie przepłukać miejsce wodą. W przypadku utrzymywania się podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.

9. Czyszczenie i przechowywanie

- Po każdym użyciu należy oczyścić powierzchnię kompresu zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie należy stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów mogących uszkodzić powłokę.
- Kompres należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i ostrych przedmiotów.
- Nie należy przechowywać produktu w sposób mogący doprowadzić do jego przebicia, przecięcia lub trwałego odkształcenia.
- Przed ponownym użyciem należy upewnić się, że produkt jest w dobrym stanie technicznym.

10. Ważne informacje dotyczące podgrzewania w kuchence mikrofalowej

- Podgrzewanie należy wykonywać wyłącznie zgodnie z parametrami określonymi przez producenta dla danego modelu kompresu.
- Nie przekraczać maksymalnej mocy ani czasu podgrzewania.
- Temperatura kompresu może być nierównomierna bezpośrednio po podgrzaniu. Przed zastosowaniem należy dokładnie sprawdzić temperaturę całej powierzchni kompresu.
- Jeżeli producent określił konieczność przerw pomiędzy kolejnymi cyklami podgrzewania, należy bezwzględnie przestrzegać tych zaleceń.

11. Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego

- W przypadku wystąpienia poważnego zdarzenia związanego z użyciem wyrobu należy przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z producentem oraz, w razie potrzeby, z lekarzem.
- W przypadku poważnego incydentu dotyczącego wyrobu medycznego należy postępować zgodnie z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi zgłaszania incydentów.
- Przed użyciem należy przeczytać instrukcję użytkowania i zachować ją na przyszłość.