

FIZJOLOVE

PRODUKT MEDYCZNY

Produkt przeznaczony do zewnętrznego stosowania na skórę nosa w celu mechanicznego rozszerzenia skrzydełek nosa i poprawy przepływu powietrza.

Ostrzeżenia

- Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- Nie stosować na uszkodzoną, podrażnioną, poparzoną lub chorobowo zmienioną skórę.
- W przypadku wystąpienia zaczerwienienia, podrażnienia, swędzenia lub reakcji alergicznej należy natychmiast zaprzestać stosowania.
- Nie używać dłużej niż 12 godzin jednorazowo.
- Produkt jednorazowego użytku – nie stosować ponownie.
- Nie stosować u dzieci poniżej 15. roku życia bez nadzoru osoby dorosłej.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Sposób użytkowania

- Oczyszczyć i osuszyć skórę nosa.
- Zdjąć warstwę ochronną zabezpieczającą klej.
- Nakleić plaster na grzbiet nosa zgodnie z instrukcją.
- Po użyciu delikatnie odkleić plaster od skóry.

Warunki przechowywania

- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nie przechowywać w pobliżu źródeł ciepła i wilgoci.
- Utylizacja

Zużyty plaster należy wyrzucić do odpadów zmieszanych zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.